

PORTUGUÊS

Para utilizar com a série HM-JACK

**Wash Liquid (Auto Detergent H)**

Apenas para uso profissional

**[CONTEÚDO DA EMBALAGEM]**

Código	Nome do produto	Componente	Quantidade
REF 052404	Wash Liquid (Auto Detergent H)	Hidróxido de potássio (<5%), Sal trissódico do ácido nitrilotriacético (5-15%), Antisséptico (<0,3%), Água e outros componentes (79-89%)	200 ml x 1

**[UTILIZAÇÃO PREVISTA]**

Este produto é uma solução de lavagem utilizada para a limpeza dos bicos do analisador imunológico totalmente automático, série HM-JACK.

**[PROCEDIMENTO]**

- Pipetar 1,0 ml de Wash Liquid (Auto Detergent H) para o recipiente de lavagem designado (Tanque de Lavagem).
- Diluir com 1,0 L de água destilada ou desionizada para preparar uma solução 1:1000 (Solução de Lavagem). Manter a mesma razão de diluição a fim de preparar uma grande quantidade de Solução de Lavagem, se necessário.
- Misturar a Solução de Lavagem suave mas cuidadosamente e deixar por 20 minutos à temperatura ambiente.
- Colocar a Solução de Lavagem preparada no analisador da série HM-JACK e aplicar WASH antes da medição. Consultar o manual de operações para obter mais detalhes.
- Utilizar a Solução de Lavagem preparada no prazo de 30 dias e NÃO adicionar a Solução de Lavagem recém-preparada à restante.

**[MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO]**

- Pipeta
- Tanque de lavagem

**[ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS]**

- Não tentar pipetar com a boca.
- Não ingerir.
- Não inalar. Operar numa área bem ventilada.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar roupa e equipamento de protecção ao manusear.
- Evitar o contato com substâncias ácidas para evitar a geração de calor.
- Evitar o contacto com metais não ferrosos (tais como cobre, alumínio e latão) que não o aço inoxidável para evitar a corrosão.
- Processar os resíduos de forma apropriada e de acordo com os regulamentos locais sobre resíduos biológicos.
- Manter o produto nas condições indicadas até à data de validade.
- Não utilizar o produto após a data de validade.
- Preparar as Soluções de Lavagem seguindo as instruções dadas. As alterações ao procedimento especificado podem prejudicar o desempenho ótimo do produto.
- Não utilizar o produto para qualquer outro fim.
- Não utilizar se forem observados danos ou fugas.
- Este produto foi especialmente concebido para ser utilizado com o analisador imunológico totalmente automatizado da série HM-JACK. Não utilizar com nenhum outro analisador.
- Este produto contém hidróxido de potássio e sal trissódico do ácido nitrilotriacético.
  - Corrosão/irritação cutânea: Categoria 1
  - Lesões oculares/irritação ocular graves: Categoria 1
  - Carcinogenicidade: Categoria 2

**[ADVERTÊNCIA DE PERIGO]**

- H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
H318 Provoca lesões oculares graves.  
H351 Suspeito de provocar cancro

**[RECOMENDAÇÃO DE PRUDÊNCIA]****Prevenção**

- P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.  
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.  
P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.  
P264 Lavar bem as peças contaminadas depois de manuseadas.  
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

### Resposta

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou para um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

### Armazenamento

P405 Armazenar em local fechado à chave.

### Eliminação

P501 Eliminar o conteúdo/contentor de acordo com a legislação local/nacional.

### [ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE]

1. Armazenamento: Não congelar. Armazenar a 2-35°C
2. Prazo de Validade: 60 meses.

### [ARMAZENAMENTO APÓS A ABERTURA]

1. Após a abertura, não esquecer de armazenar a 2-35°C com a tampa fechada bem como de utilizar o mais cedo possível.

### [DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS]

Símbolo	Definição	Símbolo	Definição
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Limitação de temperatura
	Fabricante		Utilizar até
	Marca CE		Representante Autorizado na Comunidade Europeia
	Consulte as instruções de utilização		Corrosão cutânea
	Conteúdo		Carcinogenicidade
	Número de catálogo		Apenas para uso profissional
	Código do Lote		

### Para qualquer pedido de informação, contactar:

Minaris Medical Co., Ltd.  
Departamento de Garantia de Qualidade e Assuntos Regulamentares  
1-8-10, Harumi, Chuo-ku, Tóquio, 104-6004 JAPÃO

Qualquer incidente grave associado ao produto deve ser comunicado no endereço acima e à autoridade relevante do respetivo Estado-Membro.



**Minaris Medical Co., Ltd.**  
1-8-10, Harumi, Chuo-ku,  
Tóquio, 104-6004 JAPÃO  
Tel: +81-3-6219-7617 – Fax: +81-3-6219-7614



**Obelis s.a.**  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030 Bruxelas, Bélgica