

ESPAÑOL

Para uso con la serie HM-JACK

Wash Liquid (Auto Detergent H)



Solo para uso profesional

[CONTENIDO DEL PAQUETE]

Código	Nombre del producto	Componentes	Cantidad
REF 052404	Wash Liquid (Auto Detergent H)	Hidróxido de potasio (<5%), sal trisódica de ácido nitrilotriacético (5-15%), antiséptico (<0,3%), agua y otros componentes (79-89%)	200 mL x 1

[USO PREVISTO]

Este producto es una solución de lavado utilizada para limpiar las boquillas del analizador de inmunoensayo totalmente automatizado de la serie HM-JACK.

[PROCEDIMIENTO]

- Pipetear 1,0 mL de Wash Liquid (Auto Detergent H) en el recipiente de lavado designado (depósito de lavado).
- Diluir con 1,0 L de agua destilada o desionizada para preparar una solución 1:1000 (solución de lavado). Mantener la misma proporción de dilución si fuese necesario preparar una gran cantidad de solución de lavado.
- Agitar bien esta solución de lavado, pero con suavidad, y dejarla durante 20 minutos a temperatura ambiente.
- Colocar la solución de lavado preparada en el analizador de la serie HM-JACK y accionar WASH antes de la medición. Consultar el manual de instrucciones para más información.
- Utilizar la solución de lavado preparada antes de pasados 30 días y NO mezclar solución de lavado recién preparada con restos de solución anterior.

[MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO]

- Pipeta
- Depósito de lavado

[ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES]

- No intentar pipetear por la boca.
- No ingerir.
- No inhalar. Usar en un área bien ventilada.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar ropa y equipo de protección durante la manipulación.
- Evitar el contacto con sustancias ácidas para evitar la generación de calor.
- Evitar el contacto con metales no ferrosos (como cobre, aluminio y latón) distintos al acero inoxidable para prevenir la corrosión.
- Procesar los residuos adecuadamente según la reglamentación local sobre residuos biológicos.
- Conservar el producto en las condiciones señaladas antes de que caduque.
- No utilizar el producto si ha terminado su vida útil.
- Preparar las soluciones de lavado siguiendo las instrucciones dadas. Alterar el procedimiento especificado puede afectar al rendimiento óptimo del producto.
- No utilizar el producto para ningún otro fin.
- No use si se observan daños o fugas.
- Este producto está especialmente diseñado para su uso con el analizador de inmunoensayo totalmente automatizado de la serie HM-JACK. No use con ningún otro analizador.
- Este producto contiene hidróxido de potasio y sal trisódica de ácido nitrilotriacético.
 - Corrosión/irritación cutánea: Categoría 1
 - Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 1
 - Carcinogenicidad: Categoría 2



[INDICACIÓN DE PELIGRO]

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H351 Se sospecha que provoca cáncer

[CONSEJO DE PRUDENCIA]

Prevención

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264 Lavarse las piezas contaminadas concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Respuesta

P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Almacenamiento

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/nacional.

[ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL]

1. Almacenamiento: No congelar. Almacenar a 2-35°C
2. Vida útil: 60 meses

[ALMACENAMIENTO TRAS LA APERTURA]

1. Una vez abierto, asegurarse de conservarlo a 2-35°C con la tapa cerrada y de utilizarlo lo antes posible.

[DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS]

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Limitación de temperatura
	Fabricante		Usar hasta
	Marca CE		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Consultar las instrucciones de uso		Corrosión cutánea
	Contenido		Carcinogenicidad
	Número de catálogo		Sólo para uso profesional
	Código de lote		

Para todas las consultas, ponerse en contacto con:

Minaris Medical Co., Ltd.

Departamento de Garantía de Calidad y Asuntos Reglamentarios

1-8-10, Harumi, Chuo-ku, Tokio, 104-6004 JAPÓN

Le rogamos que comunique cualquier incidente grave relacionado con el producto a la dirección indicada anteriormente y a la autoridad competente del Estado miembro.



Minaris Medical Co., Ltd.

1-8-10, Harumi, Chuo-ku,

Tokio, 104-6004 JAPÓN

Tel: +81-3-6219-7617 — Fax: +81-3-6219-7614



Obelis s.a.

Bd. Général Wahis 53

B-1030 Bruselas, Bélgica